

## Bruksanvisning Box and Block



**Produkt:** Box and Block

**Artikelnummer:** B850

**Användningsområde:** Standardiserat test för bedömning av handdominans och handkoordination.

**Instruktion:** Placera skiljeväggen i spåret. De 150 klossarna placeras på ena sidan väggen. Låt patienten flytta en kloss åt gången från ena sidan till den andra under tidtagning.

**Rengöring/Underhåll:** Tål maskindisk och ytdesinfektion.

**Återvinning:** Sortera enligt lokala föreskrifter.

**Varning:** Förvaras oåtkomligt för barn då klossarna kan orsaka kvävning.