

Catell Textil- och Gelprodukter är ett kostnadseffektivt och enklare alternativ till Siliposprodukter. Produkterna finns i olika utföranden: gel med textilbeklädnad samt i ren gel. Gelen innehåller medicinsk olja med fuktgivande egenskaper. Textilklädda produkterna ger kompression medan produkterna utan textil ger mindre kompression.

Samtliga produkter är silikon- och latexfria.

ANVÄNDNINGSMOMRÅDE

- * Skyddar mot tryck och skav
- * Motverkar ärrbildning
- * Tryckavlastande
- * Kan användas mot besvär som orsakats av torrhet
- * Hyperestesi
- * Kompression

TIPS

Produkterna kan rengöras (handtvätt) och användas på nytt. Rengör, lufttorka och strö lite talkpuder på produkten.

REKOMMENDATIONER

- * Tvätta och torka området som ska behandlas.
- * Dra strumpan/tuben över exempelvis fingret och placera gelen direkt över området som ska behandlas.
- * Avlägsna produkten minst 3-4 timmar dagligen så att huden får luftas.

För fler rekommendationer och tips, se bruksanvisning eller www.catell.se

VARNING

- * Produkterna får ej läggas på öppna sår.
- * Om irritation, obehag eller nedsatt cirkulation uppstår, kontakta läkare.

