

## SILIKONPLATTA FÖR BEHANDLING AV ÄRR

Referens	Storlek	Enheter per låda
F-02555-01	5 x 7,5 cm	2
F-02555-02	10 x 10 cm	1
F-02555-07	10 x 15 cm	1
F-02555-05	10 x 20 cm	1
F-02555-08	20 x 30 cm	1
F-02555-03	30 x 40 cm	1
F-02555-04	40 x 50 cm	1

① Mät



② Klipp



③ Ta bort plast



④ Applicera



### Produktbeskrivning

En självhäftande silikongel platta för behandling av ärr och förebyggande av keloid- och hypertrofiska ärr. Gjord för att kunna tvättas och återanvändas.

### Indikationer

För behandling av ärr och förebyggande av keloid- och hypertrofiska ärr. För användning på nya och gamla ärr. Hjälper till att förbättra ärrvävnadsåterhämtning.

### Verknings sätt

Silikongel plattan täcker ärrret och begränsar hudens relativa rörelse.

Den ocklusiva verkan av silikonerna blockerar delvis förlusten av fuktighet och håller huden hydrerad och hjälper vävnaden att återhämta sig.

### Kontraindikationer

- Används endast på intakt hud, använd inte på öppna eller vätskande sår.
- Icke-steril produkt. Använd inte på öppna vätskande sår. Använd inte produkten förrän 3 dagar efter det att du har tagit bort stygn.
- Silikongel plattan hindrar huden att andas normalt, detta kan ge en viss rodnad över det applicerade området. Om det händer, minska behandlingen till 12 timmar per dag eller mindre.
- Om rodnaden kvarstår, eller om det finns smärta eller irritation, ska behandlingen avslutas och läkare rådfrågas.

### Försiktighetsåtgärder

- Utsätt inte ärrret för solljus.
- Endast för extern användning.
- Innan appliceringen (och återapplicering) säkerställ att området och silikonplattan är rena.
- Om hudreaktion uppstår (eksem, rodnad med klåda etc.) eller om huden verkar försämrats, kontakta läkare.
- Svettning kan förekomma om det används vid varmt väder. Detta kan minska det självhäftande medlets verkan. För att undvika detta problem, tvätta det två gånger om dagen och anpassa användningen till värmeförhållandena med hjälp av ett kvarhållande bandage eller hypoallergenisk och självhäftande tejp. Om så är fallet, pressa inte ihop området för mycket eftersom det kan leda till irritation.

### Instruktion för användning

- Börja behandlingen när såret är helt läkt eller 3 (tre) dagar efter stygnen har klippts eller tagits bort.
- Applicera inte på öppna eller vätskande sår. Rengör det berörda området. Ta bort båda plastfilmerna (vit film och transparent film). Den transparenta plastfilmen kan användas för att förvara gelplattan.
- Ärrret ska vara helt täckt. Lämna inte mindre än 7 (sju) mm marginal mellan ärrret och kanten på silikongel plattan. Vid behov fixera med förband eller tejp.
- För att låta huden anpassa sig till gelplattan, starta behandlingen med en applikation om 2 (två) timmar per dag under 4 (fyra) dagar. Öka intervallet av timmar till 4 (fyra) timmar per dag de nästföljande två dagarna.
- Därefter, öka appliceringstiden med 2 (två) timmar varje dag tills den optimala behandlingstiden är nådd, som är 24 (tjugofyra) timmar per dag.
- Om det i samband med anpassningstiden observeras en negativ reaktion (ihållande och irriterande rodnad), kontakta läkare.
- För att förlänga livslängden för varje gelplatta, tvätta det med varmt vatten och mjuktvål efter varje användning och låt det torka naturligt. Undvik direkt kontakt med solen. Använd den transparenta plastfilmen som skydd vid förvaring.
- Behandlingstiden bör kontrolleras av läkare, men en minsta behandlingstid på en månad rekommenderas.
- Korrekt rengöring och förvaring av silikongel plattan ökar dess livslängd. Varaktigheten bör vara minst 5 (fem) dagar, men detta kan förlängas upp till 2 (två) - 4 (fyra) veckor.



Använd ej om förpackningen är skadad.