

SILIPOS INFORMATION

Silipos produkter är tillverkade av en patenterad polymergel som beklämts med en mjuk och bekväm textil. Gelen avger långsamt en medicinsk mineralolja (USP) som mjukar upp och fuktar huden.

Samtliga Siliposprodukter är latexfria samt hud- och allergitestade.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- * Skyddar mot tryck och skav
- * Motverkar ärrbildning
- * Tryckavlastande
- * Kan användas mot besvär som orsakats av torrhet
- * Hyperestesi
- * Kompression

TIPS

Produkterna kan rengöras (handtvätt) och användas på nytt. Rengör, lufttorka och strö lite talkpuder på produkten.

REKOMMENDATIONER

- * Tvätta och torka området som ska behandlas.
- * Dra strumpan/tuben över exempelvis fingret och placera gelen direkt över området som ska behandlas.
- * Avlägsna produkten minst 3-4 timmar dagligen så att huden får luftas.

För fler rekommendationer och tips, se bruksanvisning eller www.silipos.com

VARNING

- * Produkterna får ej läggas på öppna sår.
- * Om irritation, obehag eller nedsatt cirkulation uppstår, kontakta läkare.



SILIPOS[®]
THE GLOBAL LEADER IN GEL TECHNOLOGIES[®]